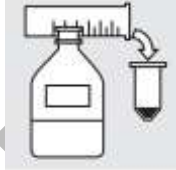
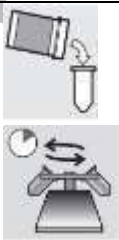
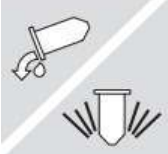


PHỤ LỤC 01: XỬ LÝ MẪU NHIỀU HỒNG CẦU

Các bước	Tiến hành	Hình ảnh minh họa
1. Chuẩn bị dung dịch rửa.	Chuẩn bị 30ml dung dịch rửa cho mỗi mẫu Thinprep Pap được xử lý. Dung dịch rửa được pha trộn 9 phần dung dịch Cytolyt (Lọ màu đỏ) và 1 phần dung dịch acid Axetic nguyên chất.	
2. Ly tâm lấy cặn của mẫu cần xử lý.	Dán thông tin định danh của bệnh nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, PID hoặc SID) vào ống eppendorf có thể chứa tối thiểu 30ml sau đó đổ toàn bộ mẫu trong lọ bảo quản sang ống eppendorf đã chuẩn bị. Tiến hành ly tâm 2000 vòng/ phút trong 10 phút.	
3. Trộn dung dịch rửa đã chuẩn bị với phần lắng của mẫu.	a. Cẩn thận đổ phần nổi phía trên khỏi ống ly tâm để tránh mất tế bào. b. Đổ 30 mL dung dịch đã chuẩn bị ở bước 1 vào ống eppendorf và đậy chặt nắp. c. Đảo ngược ống ly tâm bằng tay nhiều lần để trộn đều.	
4. Ly tâm	Tiến hành ly tâm ống eppendorf	
5. Đổ dịch nổi	Cẩn thận đổ phần nổi phía trên khỏi ống ly tâm để tránh mất tế bào.	
6. Thêm dung dịch bảo quản tế bào.	a. Sử dụng các vạch đánh dấu thể tích trên ống ly tâm, đổ một lượng dung dịch PreservCyt (lọ màu xanh) vào ống eppendorf và đổ đầy đến thể tích cuối cùng là 20 mL. Đóng chặt nắp. b. Đảo ngược ống ly tâm nhiều lần để trộn và chuyển lại mẫu vào lọ mẫu ban đầu của bệnh nhân.	

Các bước	Tiến hành	Hình ảnh minh họa
7.Xử lý trên máy ThinPrep2000	- Xử lý mẫu bằng bộ xử lý ThinPrep 2000 theo quy trình chạy bệnh phẩm phụ khoa. -Đánh giá kết quả theo Hệ thống Bethesda để báo cáo chẩn đoán tế bào cổ tử cung / âm đạo. -Nếu sau khi xử lý lại, kết quả âm tính từ mẫu không phù hợp với dấu ấn lâm sàng, có thể cần lấy lại mẫu mới.	